

## Scheda tecnica informativa

### PHARMAFORM T.S.C. Tipo Speciale Comunità Disinfettante detergente deodorante per superfici, attrezzature, pavimenti e servizi igienici Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n. 17428

<b>Proprietà e Vantaggi:</b>	<p>Pharmaform T.S.C. esercita una triplice azione igienizzante.</p> <p><b>Azione disinfettante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il benzalconio cloruro (sale quaternario d'ammonio) contenuto nel <b>PHARMAFORM TSC</b> garantisce, nel dosaggio d'impiego, un ampio spettro d'azione nei confronti di batteri gram+ e gram-, funghi e virus. L'impiego sistematico del <b>PHARMAFORM TSC</b> permette di ottenere un'efficace protezione igienico-sanitaria di qualsiasi ambiente.</li> </ul> <p><b>Azione detergente e sgrassante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PHARMAFORM TSC</b> contiene tensioattivi non ionici e un tensioattivo cationico (quaternario d'ammonio) che agiscono attivamente sullo sporco permettendone la rimozione. <b>PHARMAFORM TSC</b> grazie alla presenza di alcool isopropilico produce anche un effetto sgrassante.</li> </ul> <p><b>Azione deodorante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PHARMAFORM TSC</b> elimina i batteri che causano i cattivi odori e profuma gradevolmente gli ambienti.</li> </ul>
<b>Indicazioni d'uso</b>  <b>Applicazioni:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluire <b>PHARMAFORM TSC</b> in acqua in ragione del 4-5% (40-50 ml per lt.).</li> <li>Per il flacone da litri 1 si può utilizzare orientativamente come misurino il tappo.</li> <li>Utilizzare il prodotto puro per disinfettare previa immersione gli oggetti.</li> </ul> <p><b>Pharmaform T.S.C.</b> è indicato per l'utilizzo in Comunità, Case di Riposo, Ospedali, Scuole, Uffici, Industrie, Officine, Alberghi, Ristoranti, Impianti Sportivi, Studi Medici e Odontoiatrici, Centri Analisi.</p> <p><b>PHARMAFORM TSC</b> può essere utilizzato per la disinfezione-detersione di pavimenti e superfici, piastrelle, impianti igienici, lavabi, piani di lavoro e attrezzature. E' particolarmente indicato anche per la pulizia e la disinfezione (per immersione) di attrezzi e utensili utilizzati in studi medici, centri analisi, case di riposo e comunità</p>
<b>Composizione:</b>	<p>Cloruro di alchilbenzildimetilammonio g 1.8 (sale quaternario d'ammonio) Alcool isopropilico g 4 Tensioattivi non ionici, Acqua deionizzata e profumo q.b. a g 100</p>
<b>Aspetto:</b> <b>Profumo:</b> <b>pH:</b>	<p>Liquido azzurro Intenso alla citronella 6,5 – 7,5</p>
<b>Biodegradabilità:</b> <b>Tossicità:</b>	<p>Oltre il 90% (fosforo assente) DL50 per os nel topo = 30 ml/kg</p>
<b>Confezioni</b>	<p>- Flacone da litri 1 in cartone da 12 flaconi - Tanica da litri 5 in cartone da 4 pezzi</p>

## Informazioni riservate a personale qualificato

DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: [info@dianos.net](mailto:info@dianos.net) sito: [www.dianos.net](http://www.dianos.net)



## Scheda tecnica informativa

### Informazioni riservate a personale qualificato

**DIANOS S.R.L.**

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: [info@dianos.net](mailto:info@dianos.net) sito: [www.dianos.net](http://www.dianos.net)